

Двухкомпонентная система для ухода за стомой

Соберите принадлежности



Возьмите мешок, кожный барьер, пакет для утилизации, салфетку и (или) кусок ткани для очистки и воду. Дополнительно: ножницы, ручка, измерительный инструмент и (или) принадлежности.

Подготовьте кожный барьер и мешок



Перед каждым применением барьера измеряйте стому с помощью инструмента для определения размеров стомы (при использовании барьерного отверстия предварительно заданного размера переходите к шагу 7).

Удалите использованную систему для ухода за стомой



Осторожно приподнимите край адгезивной пластины и потяните вниз, аккуратно отодвигая кожу от кожного барьера. Надлежащим образом утилизируйте использованный мешок и кожный барьер. Смыть в унитаз запрещено!

Очистите и высушите кожу



Очистите кожу водой или мягким мылом в соответствии с рекомендациями квалифицированного работника здравоохранения. Тщательно промойте и высушите. Не наносите на кожу масла, присыпку, лосьон или жидкое мыло.

Проверьте состояние кожи



Удостоверьтесь, что кожа вокруг стомы (перистомально) не повреждена, на ней отсутствует раздражение, сыпь или покраснение*.

* Свяжитесь с вашей медсестрой WOC/NSWOC, если обнаружите раздражение, сыпь или покраснение.



Обведите барьерное отверстие нужного размера на кожном барьере. Кожный барьер должен подходить к месту пересечения кожи и стомы. Удостоверьтесь, что между кожным барьером и стомой не видно кожи, чтобы предотвратить утечку и раздражение кожи.



Используя маленькие изогнутые ножницы, осторожно прорежьте отверстие в кожном барьере, чтобы оно соответствовало нанесенному рисунку. При вырезании не выходите за линию на защитной пленке.



Снимите защитную пленку с кожного барьера.

Нанесите пасту или добавьте кольца при необходимости



При необходимости приложите барьерное кольцо или нанесите каплю пасты вокруг отверстия, следуя инструкциям по применению.


Разместите новую систему для ухода за стомой



Разместите отверстие кожного барьера над стомой в форме ромба. При наличии окантовки из клейкого материала удалите защитную бумагу с обеих сторон и прижмите клейкую сторону к коже.



Слегка надавите на кожный барьер примерно на минуту для обеспечения более надежной адгезии.

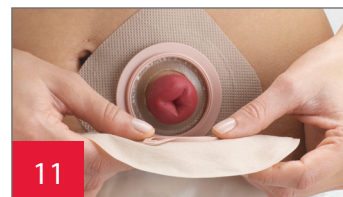

Прикрепите мешок к кожному барьеру, сцепив нижние края фланца мешка и фланца кожного барьера. Сожмите вместе два фланца. Серия «щелчков» подтвердит, что вы сделали это правильно. Прекращение «щелчков» означает, что мешок надежно закреплен.



Закройте дно мешка. При использовании дренируемого мешка закройте застежку **Lock 'n Roll** в нижней части мешка или примените зажим для мешка. Более подробную информацию о том, как использовать данную систему закрытия, см. в разделе *Советы по уходу за застежкой Lock 'n Roll*.



При использовании уростомного мешка удостоверьтесь, что сливной клапан закрыт. Капля на сливном клапане должна быть обращена к стороне мешка, обращенной к телу. При желании закройте крышку, находящуюся в коробке.

